



FUNKTIONEN UND VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Kindgerechtes Aussehen
- Sichtbare Rückmeldung der Ballonbewegung motiviert die Kinder und hilft den Eltern
- Eine Fluss- und Volumen-Kontrolle gibt ein optimiertes Inhalationsmanöver vor
- Große Zeitersparnis einer einzigen notwendigen Einatmung
- Kinderleicht in der Bedienung und Reinigung


Mit dem Watchhaler wird die Therapie so effektiv und angenehm wie möglich gemacht!

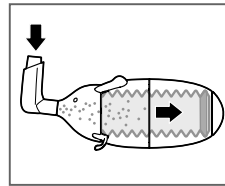

1. Dosieraerosol (MDI)
aufsetzen und auslösen

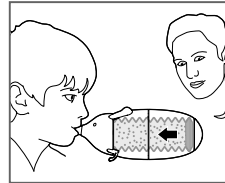

2. Vor der Inhalation ganz
ausatmen und das Mundstück
in den Mund nehmen

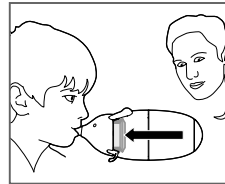

3. Das Kind am Mundstück
saugen lassen, bis sich der
Ballon völlig zusammen faltet

MEHR SPASS AM INHALIEREN

Erfahren Sie mehr! Informieren Sie sich über den Watchhaler im Internet oder rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.

- Internet: www.watchhaler.de
- Service-Hotline: 0180 | 22 66 440 (6 ct./Gespräch)

www.agenturzz.de

MEHR SPASS AM INHALIEREN

Der Watchhaler – Die innovative Inhalationshilfe für Ihr Kind mit visueller Erfolgskontrolle und kinderleichter Anwendung



ACTIVAERO
TECHNOLOGIES

Activaero GmbH
Wohraer Str. 37
35285 Gemünden - Germany
email: service@watchhaler.de



WATCHHALER™


DER WATCHHALER – DESIGN- UND FUNKTIONSIINNOVATION

Mit dem Watchhaler beginnt ein neues Zeitalter im Bereich der Kinderinhalationshilfe!

Denn während übliche Inhalationshilfen eher schlicht gehalten sind, ist der Watchhaler in einer farbigen Tierform gestaltet. Dies macht nicht nur die Inhalationsbehandlung für das Kind angenehmer. Der Watchhaler löst darüber hinaus bisherige Koordinationsprobleme, verringert die elektrostatische Aufladung und gibt eine sichtbare Rückmeldung. Und das macht ihn so einzigartig und innovativ!

Der Watchhaler besteht hierfür aus einem durchsichtigen Gehäuse mit einem beweglichen grünen Ballon im Inneren. Der Ballon dient dabei als Zwischenspeicher für die Medikamententröpfchen und faltet sich während der Inhalation zusammen. Eine erfolgreiche Inhalation ist somit sofort für Kinder und Eltern sichtbar. Während der Inhalation sorgt zusätzlich ein mechanisches Ventil für eine langsame und angenehme Einatmung.

KINDERLEICHT IN DER HANDHABUNG UND PFLEGE

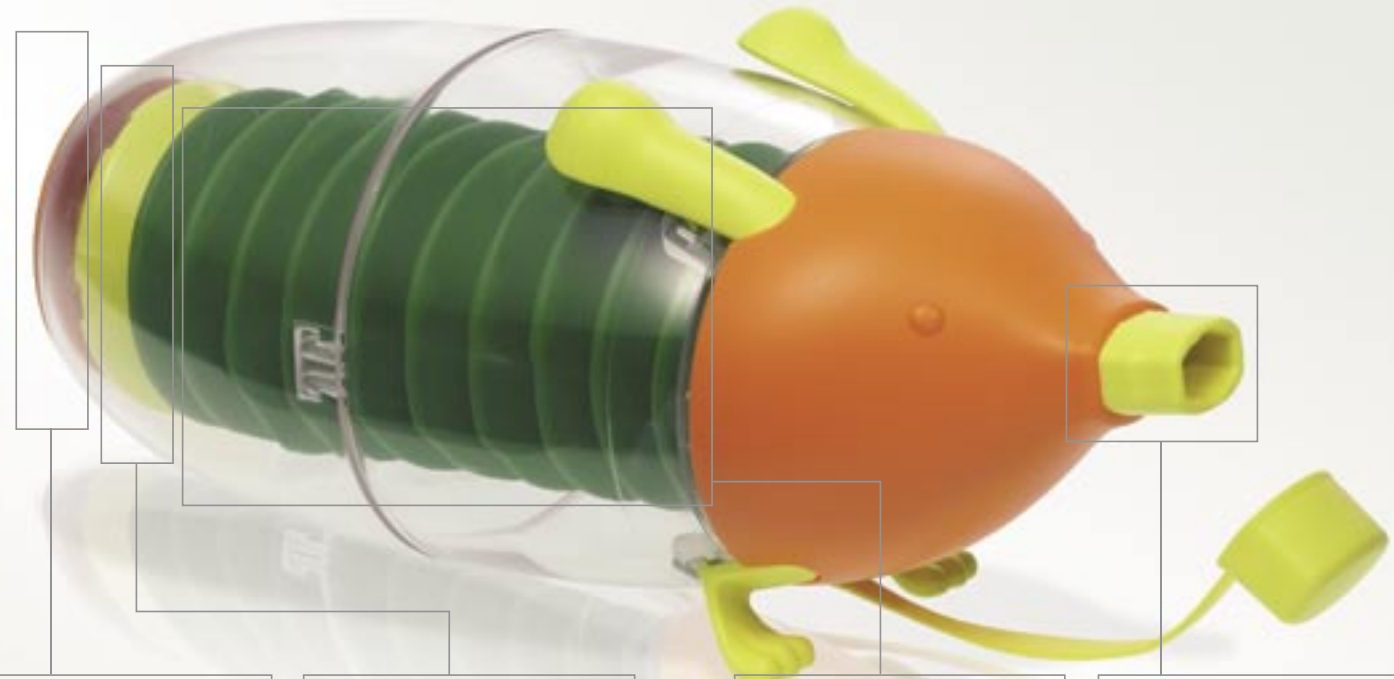

FLUSSVENTIL

Das limitierende Ventil optimiert den Inhalationsfluss. Dadurch wird dem Kind ermöglicht, langsam und angenehm zu inhalieren, was eine konstantere und bessere Medikamentengabe in der Lunge ermöglicht.

RING

Der gelbe Ring am Ballon ist eine sichtbare Erfolgskontrolle und motiviert spielend die Kinder optimal zu Inhalieren und hilft den Eltern eine gelungene Inhalation zu erkennen.

FALTENBALLON

Das durchsichtige Gehäuse und der Silikon-Faltenballon sind in einem kindgerechten Design, welches für eine bessere Patientenakzeptanz sorgt. Dieser Aufbau reduziert die oft problematische Elektrostatik. Der Ballon gibt ein standardisiertes Inhalationsvolumen vor, welches wie bei einer Pumpe mit einer einzigen Inhalation die Medikamententröpfchen in die Lunge befördert.

MUNDSTÜCK

Das Mundstück dient zum Aufstecken der gängigen Asthmasprays (MDIs), welches durch die kleine und größere Aufsteckmöglichkeit erreicht wird. Die Größe des Mundstückes ist angepasst auf kleine Kindermünder.



WATCHHALER™

INTERNET
SERVICE-HOTLINE WWW.WATCHHALER.DE
0180 | 22 66 440 (6 ct./Gespräch)

