



## FONCTIONS ET AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

- Aspect adapté à l'enfant
- Le contrôle visuel de succès par le mouvement du ballon motive les enfants et aide les parents
- Un contrôle du débit et du volume optimise le processus d'inhalation
- Un grand gain de temps par une seule inspiration nécessaire
- Utilisation et nettoyage simples comme un jeu d'enfant


Le Watchhaler rend la thérapie aussi efficace et agréable que possible !

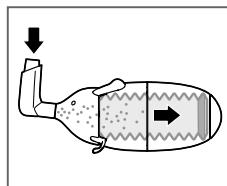

1. Poser et libérer l'aérosol doseur (MDI)

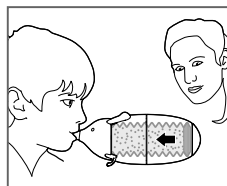

2. Expirer à fond avant l'inhalation et introduire l'embout buccal dans la bouche

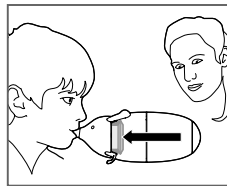

3. Faire aspirer l'enfant sur l'embout buccal jusqu'à ce que le ballon se replie complètement.

## PLUS DE PLAISIR A L'INHALATION

Pour en savoir plus sur le Watchhaler, consultez notre site internet ou appelez-nous. Nous sommes à votre disposition.

- Internet: [www.watchhaler.de](http://www.watchhaler.de)
- Service-Hotline: 0180 | 22 66 440 (6 ct./appel)

www.agenturzz.de

## PLUS DE PLAISIR A L'INHALATION

Le Watchhaler – le dispositif d'inhalation innovant pour votre enfant avec contrôle visuel de succès de l'inhalation et simple à utiliser comme un jeu d'enfant



ACTIVAERO  
TECHNOLOGIES

Activaero GmbH  
Wohraer Str. 37  
35285 Gemünden - Germany  
email: [service@watchhaler.de](mailto:service@watchhaler.de)



WATCHHALER™


## LE WATCHHALER – INNOVATION DESIGN ET FONCTION

Le Watchhaler marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine de l'aide pédiatrique à l'inhalation.

Alors que les inhalateurs traditionnels sont plutôt simples, le Watchhaler a la forme d'un animal de couleur. Ceci rend le traitement par l'inhalation plus agréable pour l'enfant.

Le Watchhaler résout en plus les problèmes de coordination, réduit la charge électrostatique et donne une bonne information visuelle en retour. Tout ceci le rend unique et innovant! Le Watchhaler est composé pour cela d'un boîtier transparent et d'un ballon mobile vert à l'intérieur. Le ballon sert de réserve pour les gouttelettes de médicament et se replie complètement pendant l'inhalation. Le succès de l'inhalation est ainsi immédiatement visible pour les enfants et les parents. Une valve mécanique garantit une inspiration lente et tranquille pendant l'inhalation.

## UN JEU D'ENFANT POUR LA MANIPULATION ET L'ENTRETIEN

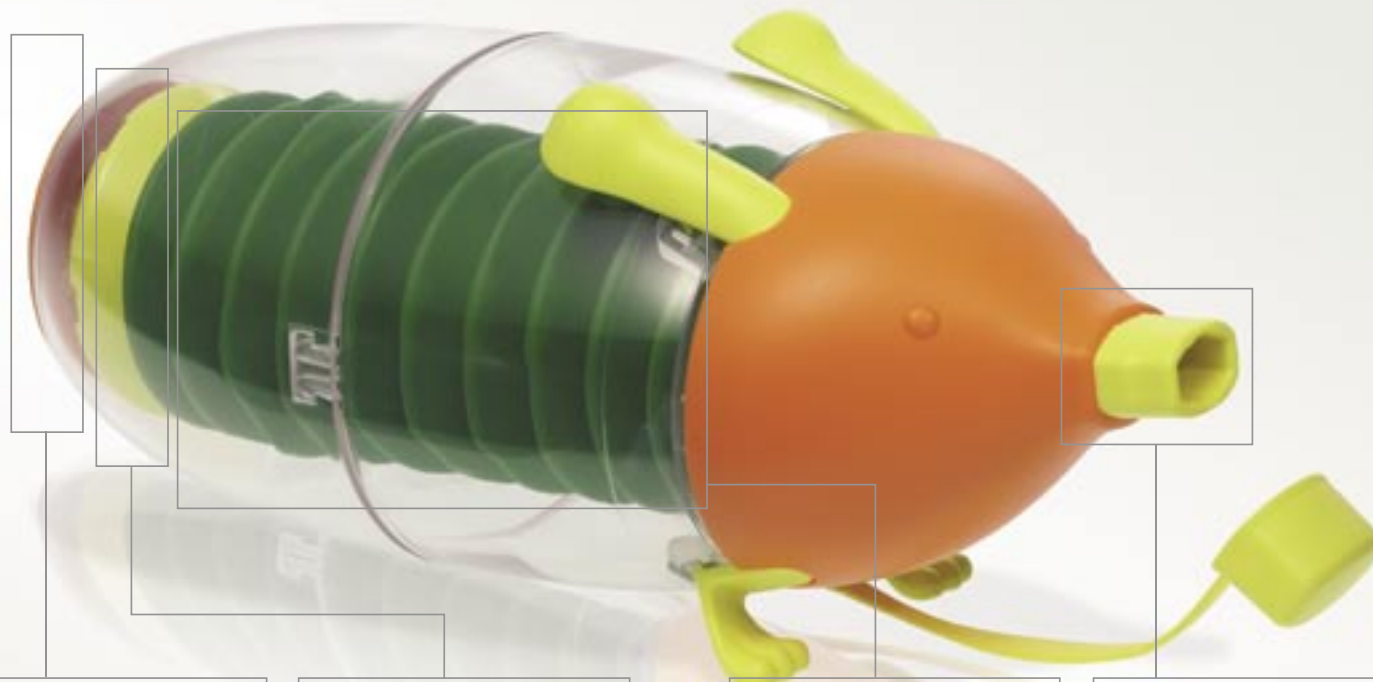

### SOUPAPE DE DEBIT

La valve de limitation optimise le débit de l'inhalation. L'enfant peut ainsi inhaler lentement et agréablement, ce qui permet une application plus constante et plus efficace du médicament.

### ANNEAU

L'anneau jaune sur le ballon est une preuve visible du succès de l'inhalation qui motive les enfants par le jeu à réussir l'inhalation et aide les parents à s'assurer que l'inhalation a été faite correctement.

### BALLON A PLIS

Le boîtier transparent et le ballon à plis en silicone sont réalisés dans un design adapté à l'enfant qui garantit une meilleure acceptation par le patient. Cette structure réduit le problème fréquent de l'électrostatique. Le ballon définit un volume standard à inhaler qui transporte tel une pompe les gouttelettes de médicament dans les poumons en une seule inhalation.

### EMBOUT BUCCAL

L'embout buccal s'emboîte sur les sprays courants de médicaments anti-asthmatiques (MDIs) ceci par la possibilité d'un raccord petit ou plus grand. La taille de l'embout est adaptée à la bouche des petits enfants.



# WATCHHALER™

INTERNET  
SERVICE-HOTLINE

WWW.WATCHHALER.DE  
0180 | 22 66 440 (6 ct./appel)

